




# Karbondioksid CE

Medisin teknisk utstyr, Laparoskopi

Karbondioksid CE - Medisin teknisk utstyr, leveres som en kondensert gass. Gassen fremstilles etter tilsvarende prosedyrer som vår medisinske gass, i henhold til den europeiske farmakopée; (Ph Eur), Monografi nr: 375 for Medisinsk CO<sub>2</sub>.

Produktet er klassifisert i henhold til Standard EN ISP 13485:2003 og Direktiv 93/42/ECC/2007/ CE Medical Device og benyttes til bl.a. laparoskopi.

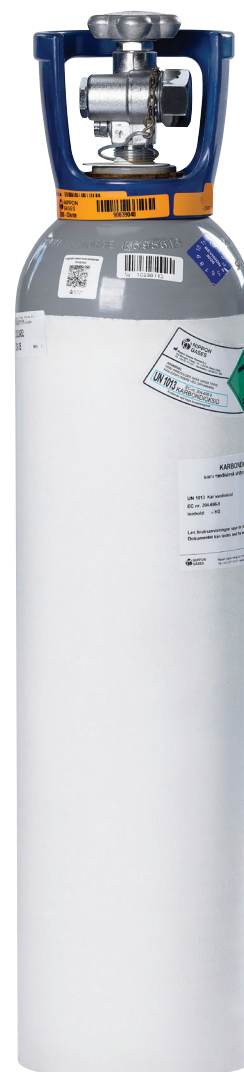

# Karbondioksid CE





## Medisin teknisk utstyr, Laparoscopi

### Tekniske data:

Flaskemateriale:	Stål
Ventil:	W27x2mm x 1/4", høyre utvendig ISO 5145 nr. 17
Fylletrykk maks:	+ 15°C / + 20°C, 51 / 57 bar
Lagringstemperatur:	Maks + 45°C
Flaskefarge:	Hvit sylindarfarge og lys grå skulderfarge
Transportkode:	UN 1013
Holdbarhet:	5 år

### Sikkerhetsinstruks for anvendelse og håndtering:

- Medisinske gasser skal bare brukes til medisinske formål. Flaskene skal oppbevares i ventilerte rom og ikke utsettes for høy varme.
- Bruk bare standardutrustning som er tilpasset for medisinteknisk CO<sub>2</sub>.
- La aldri olje eller fett komme i kontakt med utrustningen.
- Kontroller at flaskene er forseglet samt ta bort forseglingen fra ventilen før bruk.
- Kontroller at den automatiske koblingen eller regulatoren er ren og at tilkoblingene er i god stand.
- Bruk aldri verktøy på en trykk-/flowregulator som er beregnet til manuell tilkobling. Det er fare for at regulatoren kan skades.
- Åpne alltid flaskeventilen sakte, og åpne den minst en halv omdreining.
- Lekkasje sjekk gjennomføres i henhold til instruksjonen som følger med regulatoren. Ikke forsøk å håndtere lekkasje fra ventilen eller utstyr på egenhånd foruten om å bytte pakning eller O-ring.
- - Dersom det oppdages lekkasje, steng ventilen og koble fra regulatoren. Merk flasken som defekt og returner til leverandøren.
- Det er viktig å la et trykk på ca 2 bar være igjen i flasken for å beskytte den mot forurensning. Flaskeventilen stenges for hånd etter bruk. Avlast deretter trykket i regulator eller annen tilslutning.

Flaskestørrelse	8 L	40 L
		
Varenummer gass	503125	503129
Høyde inkl. ventil (mm)	710	1300
Diameter (mm)	160	230
Vekt inkl. gass (kg)	15	80
Volum gass i kg	6	30

Nippon Gases forbeholder seg retten til endringer i denne spesifikasjonen som følge av lovkrav, råvarer, produksjonspålegg o.l. For sikkerhetsdatablad eller annen informasjon se våre hjemmesider [www.nippongases.no](http://www.nippongases.no)

Ref. Brukerveiledning for karbondioksid for Laparoscopi.

