




# Kortinstruktion

## Medicinsk Oxygen Nippon Gases, IPR 3 L

### Före användning

- Använd inte Medicinsk oxygen Nippon Gases efter utgångsdatum; kontrollera därför alltid produktmärkningen av läkemedlets hållbarhet.
- Kontrollera hur mycket oxygen som finns kvar i flaskan genom att läsa av tryckmätaren (5).
- Kontrollera att flödesväljaren (3) är inställd på "0" i position.
- Öppna långsamt avstängningsventilen (vrid moturs) ett halvt till max ett helt varv (1).
- Anslut mask eller näsgrimpa till slangnippeln (4) alternativt annan utrustning till snabbkopplingen (2). Använd endast flödesväljaren (3) om utrustning är ansluten till slangnippeln (4).
- Påbörja ordinerad behandling.

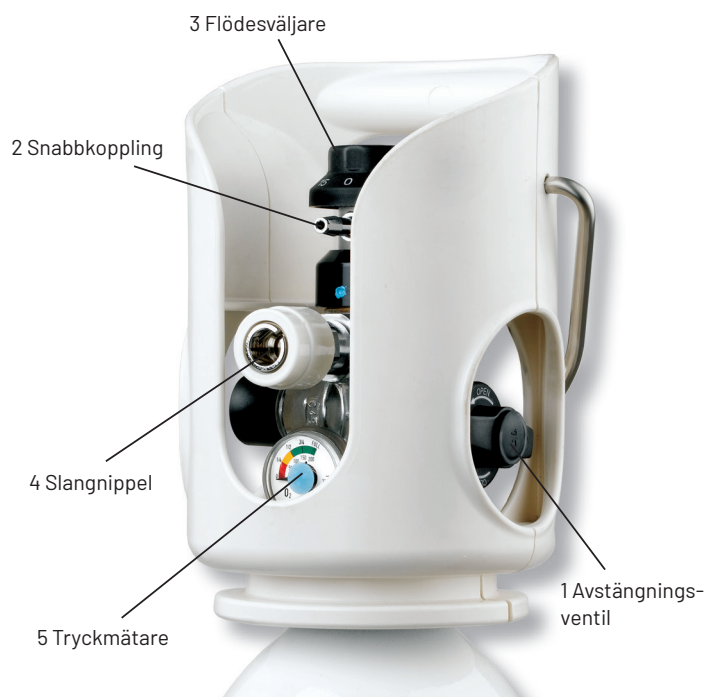

### Efter användning:

- Stäng avstängningsventilen genom att vrida tillbaka den medurs (1).
- Koppla bort utrustningen (2 eller 4).
- Vrid tillbaka/Stäng flödesväljaren (3) samt kontrollera att denna står på "0" (noll) i position.

### Säkerhetsåtgärder

- Rökning och öppen eld är förbjuden där produkten används.
- IPR-flaskan flyttas om möjligt till säker plats vid risk för brand.
- Sörj för god ventilation i rummet där oxygenet förvaras/brukas.
- IPR-flaskan får inte utsättas för stark värme alternativt för frätande ämnen.
- Låt aldrig fett och/eller olja komma i kontakt med utrustningen.
- Se till att cylindern inte är skadad; kontakta annars Nippon Gases omgående.
- Innan du öppnar ventilen eller hanterar cylindern, se till att händerna är rena. Om du använder vätska eller gel med alkohol, se till att det har avdunstat fullständigt.
- Produkten är MR-kompatibel upp till 3,0 tesla och själva ventilen på IPR-flaskan får inte föras närmare än 30 cm från magnetöppningen vid MR-undersökningar.

### Hur länge räcker gasen?

I tabellen anges ungefärlig tid som Medicinsk oxygen Nippon Gases, IPR 3L räcker vid olika oxygenflöden:

Str.	Tryck	3 l/min.	6 l/min.	12 l/min.
3 L	200 bar	3H 13 min	1H 40 min	50 min



# Kortinstruktion

## Medicinsk Oxygen Nippon Gases, IPR 3 L

### Före användning


- Använd inte Medicinsk oxygen Nippon Gases efter utgångsdatum; kontrollera därför alltid produktmärkningen av läkemedlets hållbarhet.
- Kontrollera hur mycket oxygen som finns kvar i flaskan genom att läsa av tryckmätaren (5).
- Kontrollera att flödesväljaren (3) är inställd på "0" i position.
- Öppna långsamt avstängningsventilen (vrid moturs) ett halvt till max ett helt varv (1).
- Anslut mask eller näsgrimpa till slangnippeln (4) alternativt annan utrustning till snabbkopplingen (2). Använd endast flödesväljaren (3) om utrustning är ansluten till slangnippeln (4).
- Påbörja ordinerad behandling.

### Efter användning:

- Stäng avstängningsventilen genom att vrida tillbaka den medurs (1).
- Koppla bort utrustningen (2 eller 4).
- Vrid tillbaka/Stäng flödesväljaren (3) samt kontrollera att denna står på "0" (noll) i position.

### Säkerhetsåtgärder

- Rökning och öppen eld är förbjuden där produkten används.
- IPR-flaskan flyttas om möjligt till säker plats vid risk för brand.
- Sörj för god ventilation i rummet där oxygenet förvaras/brukas.
- IPR-flaskan får inte utsättas för stark värme alternativt för frätande ämnen.
- Låt aldrig fett och/eller olja komma i kontakt med utrustningen.
- Se till att cylindern inte är skadad; kontakta annars Nippon Gases omgående.
- Innan du öppnar ventilen eller hanterar cylindern, se till att händerna är rena. Om du använder vätska eller gel med alkohol, se till att det har avdunstat fullständigt.
- Produkten är MR-kompatibel upp till 3,0 tesla och själva ventilen på IPR-flaskan får inte föras närmare än 30 cm från magnetöppningen vid MR-undersökningar.

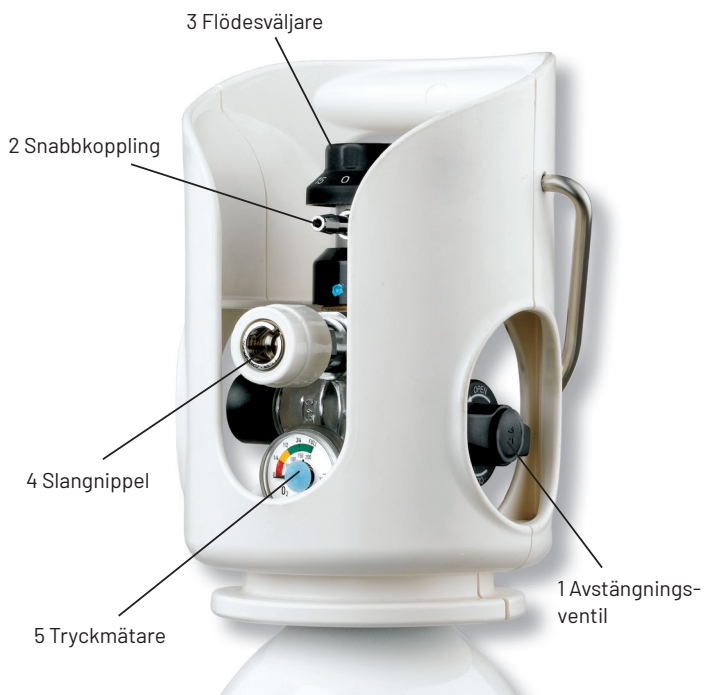

### Hur länge räcker gasen?

I tabellen anges ungefärlig tid som Medicinsk oxygen Nippon Gases, IPR 3L räcker vid olika oxygenflöden:

Str.	Tryck	3 l/min.	6 l/min.	12 l/min.
3 L	200 bar	3H 13 min	1H 40 min	50 min