



Medicinsk oxygen IPR

- integrerad ventil

Före användning

- Använd inte Medicinsk oxygen Nippon Gases efter utgångsdatum; kontrollera därför alltid produktmärkningen av läkemedlets hållbarhet.
- Kontrollera hur mycket oxygen som finns kvar i flaskan genom att läsa av tryckmätaren (5).
- Öppna långsamt flödesväljare (vrid moturs) ett halvt till max ett helt varv (1).
- Anslut mask eller näsgrimpa till slangnippeln (2) alternativt annan utrustning till snabbkopplingen (4). Använd endast flödesväljaren (3) om utrustning är ansluten till slangnippeln (2).
- Påbörja ordinerad behandling.

Efter användning:

- Stäng flödesväljaren (3) genom att vrida den mot minus.
- Koppla bort utrustningen (2 eller 4).

Säkerhetsåtgärder

- Rökning och öppen eld är förbjuden där produkten används.
- IPR-flaskan flyttas om möjligt till säker plats vid risk för brand.
- Sörj för god ventilation i rummet där oxygenet förvaras/brukas.
- IPR-flaskan får inte utsättas för stark värme alternativt för frätande ämnen.
- Låt aldrig fett och/eller olja komma i kontakt med utrustningen.
- Se till att cylindern inte är skadad; kontakta annars Nippon Gases omgående.
- Innan du öppnar ventilen eller hanterar cylindern, se till att händerna är rena. Om du använder vätska eller gel med alkohol, se till att det har avdunstat fullständigt.
- Produkten är MR-kompatibel upp till 3,0 tesla och själva ventilen på IPR-flaskan får inte föras närmare än 30 cm från magnetöppningen vid MR-undersökningar.

Hur länge räcker gasen?

- I tabellen anges ungefärlig tid som Medicinsk oxygen Nippon Gases, IPR 2L räcker vid olika oxygenflöden:

Str.	Tryck	3 l/min.	6 l/min.	12 l/min.
5 L	200 bar	5H 30 min	2H 45 min	1H 20 min

