



Protoxan

Produktdatablad - IPR

Nippon Gases har produktionstillstånd för tillverkning av medicinska gaser; vilket är förankrat i det europeiska regelverket kopplat till Good Manufacturing Practices (GMP). Läkemedelsverkets nummer på godkännande för försäljning är 47884 (MT).



Protoxan



Produktdatablad - IPR

Tekniska data:

Flaskmaterial:	Aluminium
Ventil standard:	"IPR" - Kombinationsventil med integrerad tryckregulator, aktiv manometer, snabbkoppling och flödesväljare. Nippel M12x1,25 i enlighet med EN13544-2 och snabbkoppling i enlighet med Svensk standard "SS 875 24 30; 2004".
Fyllningstryck max:	170 bar
Utloppstryck i snabbkopplingen:	4 bar
Temperatur användningsområde:	Gasflaskan måste lagras vid temperaturer över -5 °C, för att undvika kondensering av innehållet. Produkten levereras i gasflaskor med vit (RAL 9010) flaskkropp och vit (RAL 9010) och blå (RAL 5010) skuldra.
Flaskfärg:	UN107
Transportkod:	UN107
Hållbarhet:	Anges på flaska

Flaskstorlek	Formel	Koncentration	Enhet	Tolerans Vol-% absolut
Medicinsk lustgas	N ₂ O	50	Vol-%	±2
Medicinsk oxygen	O ₂	50	Vol-%	±2
Fuktighet	H ₂ O	< 67	Vol-ppm	
Diameter (mm)	7,7			
Volym i L	1000			

Flaskstorlek	2 L (IPR)	5 L (IPR)
Varunr.	503122	503122
Höjd inkl. ventil (mm)	540	750
Diameter (mm)	117	140
Volym gas (m ³)	0,56	1,4
Vikt inkl. gas (kg)	c:a 5,2	c:a 9,0

Uppgift om innehåll och trycket är nominella.

Säkerhetsanvisningar för användning och hantering:

- Protoxan är endast avsett för medicinskt bruk.
- Rökning och öppen eld är förbjuden där produkten används.
- Flaskan flyttas om möjligt till säker plats vid risk för brand.
- IPR-flaskan får inte utsättas för stark värme alt. för frätande ämnen (exempelvis ammoniak).
- Låt aldrig fett och/eller olja komma i kontakt med utrustningen.
- Eventuellt skadad cylinder får ej användas.
- Innan du öppnar ventilen eller hanterar cylindern, se till att händerna är rena. Om du använder vätska eller gel med alkohol, se till att det har avdunstat fullständigt.
- Använd inte Protoxan efter utgångsdatum; kontrollera därför alltid produktmärkningsen av läkemedlets hållbarhet.

För mer information se vår hemsida www.nippongases.se

